

INDICADOR BIOLÓGICO PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 24 HORAS



Importador: DinMed S.A.S

Fabricante: Ugaiya

Registro Sanitario: 2023DM-0026636

Fecha de vencimiento del registro sanitario: 02/03/2033

Clasificación de riesgo: I

Vida útil: 2 años

Material: Polímero, vidrio, filtro y medio de cultivo

Presentación: Unidad

Normas internacionales: ISO 11138-1, ISO 11138-3

Referencia: 3002UGBI0502



Características:

Los indicadores biológicos para peróxido de hidrógeno (H_2O_2) de lectura de 24 horas contienen microorganismos que permiten confirmar el rendimiento del equipo, verificar los procedimientos de esterilización y monitorear los efectos de la esterilización en los dispositivos médicos.

Propiedades:

| Biological Indicator For VH_2O_2 | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Model | UGBI0502 |
| Packing | 50pcs/Box |
| Organism | G-stearothermophilus ATCC7953 |
| Population(mean/strip) | $\geq 1.0 \times 10^6$ c.f.u. |
| D-value | $\geq 1s$ (50°C, 2.3mg/L VH_2O_2) |
| Incubation Time | 24~48H |
| Frequency of Use | Test 1 time every sterilization cycle |

Indicación: Control de ciclos de esterilización por Peróxido de Hidrógeno (H_2O_2).

Tiempo de lectura: 24 horas.

Modo de uso:

Esterilizar el indicador biológico junto con la carga (no romper la ampolla antes de esterilizar), una vez finalice el ciclo, saque el indicador del equipo, rompa la ampolla y póngala en la incubadora para monitorear el crecimiento de esporas.

INDICADOR BIOLÓGICO PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 24 HORAS

DinMed

Viraje del indicador:

Falla en el proceso → morado a amarillo



Proceso exitoso → se mantiene morado



Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar (iluminación artificial preferiblemente).

Este producto al igual que todos los indicadores químicos, debe almacenarse alejado de agentes esterilizantes.

Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

Nota: El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento, y alterar el color final de los indicadores.

No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.

No reusar el producto por ningún motivo.

