

# INDICADOR QUÍMICO VAPOR TIPO 6

DinMed

**Importador:** DinMed S.A.S

**Fabricante:** Ugaiya

**Registro Sanitario:** 2023DM-0026636

**Fecha de vencimiento del registro sanitario:** 02/03/2033

**Clasificación de riesgo:** I

**Vida útil:** 3 años

**Material:** Papel, tinta.

**Presentación:** Caja X 200

**Normas internacionales:** ISO 11140-1

**Referencia:** 3002UGCI0106

## Características:

Los indicadores químicos emuladores clase 6 fabricados con tinta especial sensible al calor, monitorean el ciclo de esterilización a vapor emulando los parámetros de este, viran de amarillo a negro cuando el proceso es exitoso.

<b>Tiempo de exposición para virar completamente a negro</b>	<b>17.5 min at 121°C</b>	<b>3.5 min at 134°C</b>
--	--------------------------	-------------------------

**Indicación:** Control de ciclos de esterilización por Vapor.

**Tiempo de Exposición:** 121°C 17.5 minutos / 134°C 3.5 minutos.

## Modo de uso:

Control del paquete a esterilizar, prueba de las condiciones de cada paquete individualmente.



# INDICADOR QUÍMICO VAPOR TIPO 6

DinMed

## Viraje del indicador:

Amarillo a negro



## Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar (iluminación artificial preferiblemente).

Este producto al igual que todos los indicadores químicos, debe almacenarse alejado de agentes esterilizantes.

**Condiciones de transporte:** Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

**Nota:** El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento, alterar el color final de los indicadores químicos.

No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.

No reusar el producto por ningún motivo.

