

TEST DE BOWIE DICK



Importador: DinMed S.A.S

Fabricante: Ugaiya

Registro Sanitario: No requiere 2023018657

Fecha de vencimiento del registro sanitario: N/A

Clasificación de riesgo: N/A

Vida útil: 3 años

Material: Papel grado médico, papel crepado, tarjeta de tinta y etiquetas

Presentación: Unidad 12cm X 12cm X 1.2cm

Normas internacionales: ISO-11140-1, ISO 11138-1

Referencia: UGBD0102



Características:

El paquete de prueba Bowie Dick es un indicador químico de tipo II que se utiliza para evaluar la eficiencia de la extracción del aire de los esterilizadores de Vapor con bomba de vacío y la dispersión de vapor en la cámara, los parámetros para el viraje del test son:

Tiempo de exposición para virar completamente a negro	15.1min at 121°C	3.5 min at 134°C
--	-------------------------	-------------------------

Indicación:

El propósito de la prueba Bowie-Dick es informar al usuario del estado y el funcionamiento del sistema de bomba de vacío del esterilizador, el hermetismo de la cámara y la dispersión del vapor en esta.

Modo de uso:

Se recomienda usar un teste de Bowie Dick diariamente y después de realizar mantenimiento correctivo o preventivo a los esterilizadores de vapor con bomba de vacío.

Se debe cargar un test de Bowie Dick en la cámara (sin presencia de carga adicional) ubicado en la zona anteroinferior, en posición horizontal, cerca de la puerta y sobre el sistema de desagüe.

TEST DE BOWIE DICK

**Viraje del indicador:
Amarillo a negro**



El viraje de la tinta química debe ser uniforme, en caso de presentar un viraje incompleto o parcial debe repetirse el test de Bowie Dick en un nuevo ciclo, si el problema persiste se debe programar mantenimiento correctivo del equipo y realizar nuevamente el test para confirmar el correcto funcionamiento de este.

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.
- Almacenarse protegido de exposición a la luz solar (iluminación artificial preferiblemente).
- No almacenar cerca de agentes esterilizantes.

Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

Nota: El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento y alterar el color final de los indicadores.

No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.

No reusar el producto por ningún motivo.

