

# FICHA TÉCNICA

## LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL

### LINEA MULTIPROPÓSITO

DinMed

**Comercializador:** DinMed S.A.S  
**Fabricante:** Laboratorio Orgánica Biotech S.A.S  
**Registro Sanitario:** No requiere 2024014069  
**Vida útil:** 24 meses.  
**Presentación:** 120 ml.



#### Descripción:

Lubricante limpiador multipropósito de instrumental, piezas de mano o cualquier pieza articulada que requiera lubricación diseñado para el uso en consultorios odontológicos, veterinarias, centros estéticos y otras instituciones que lo requieran, ideal para brillar superficies metálicas y protegerlas de la corrosión y el óxido,.

Es excelente para recuperar la movilidad en pinzas articuladas como tijeras, pinzas o instrumentos varios.

#### Composición:

Lubricante en aerosol, aceite mineral, D-limoneno.

#### Modo de uso:

Debe usarse en la etapa posterior al lavado del instrumental, aplicar rociando una pequeña cantidad garantizando que queden bien cubiertas las partes de la pieza a lubricar, secar el exceso con una toalla de papel y proceder con el empaque o uso.

#### Condiciones de transporte:

Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

#### Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar (iluminación artificial preferiblemente).

# FICHA TÉCNICA

## LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL

### LINEA MULTIPROPÓSITO

---

DinMed

#### Precauciones:

Utilizar los elementos de protección personal como gafas y guantes..

No ingerir.

Para más información consultar la FDS.

**Nota:** El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento.

Producto de uso institucional e industrial.

No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.

