

CORTADORA MANUAL

DinMed

Importador: DinMed S.A.S

Fabricante: Ugaiya

Registro Sanitario: No Aplica

Modelo: UG211

Material: Acero inoxidable 304

Dimensiones: Largo 80 cm, ancho 35 cm y alto 12 cm


Peso: 5 Kg

Operación: Manual

Características:

Cortadora bidireccional de papel grado médico y tyvek.

Para mejorar la resistencia general del producto, la cortadora tiene una estructura metálica y las piezas principales son de acero, lo cual le da alta resistencia para garantizar una prolongada vida útil y un corte preciso y suave.

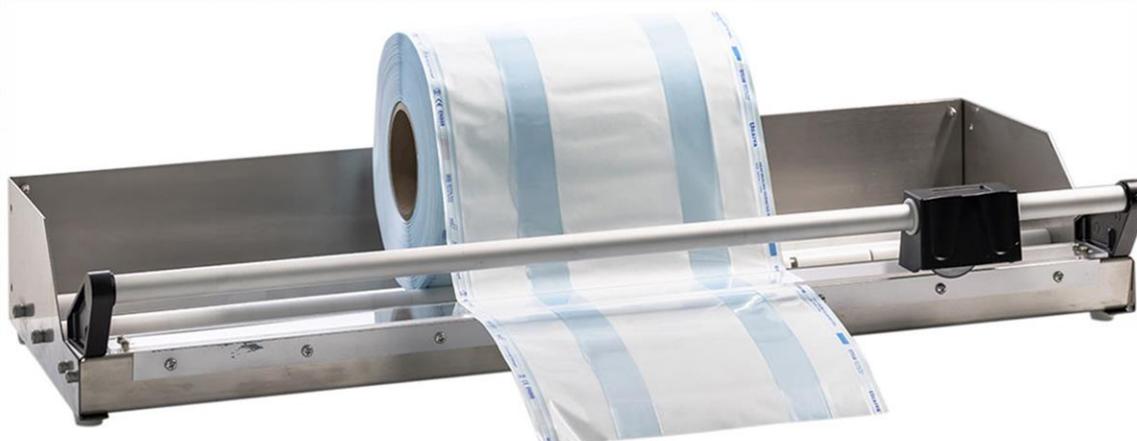

CORTADORA MANUAL



Modo de uso:

1. Presione el papel a cortar debajo de la regla y prepárelo en la mesa de corte según el tamaño requerido.
2. Empuje o tire del sistema de cuchilla de un extremo al otro, esta acción ejecutará el corte.

Precauciones:

- Al cortar, debe aplicarse fuerza de empuje controlada y uniforme al sistema de cuchilla a lo largo de la dirección de la varilla guía y no debe aplicado en otras direcciones, esto puede generar daños en el equipo.
- Dentro del sistema de chuchilla, se instala una esponja empapada en aceite, que puede dejar caer unas gotas de aceite lubricante cuando la guía se desliza inadecuadamente sobre la varilla.
- Después de finalizar el corte, estacione el sistema de cuchilla en un extremo de la varilla de guía.
- Por su seguridad, no toque la cuchilla con la mano para evitar cortes.

