

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA INSTRUMENTAL

LÍNEA MULTIPROPÓSITO

DinMed

Comercializador: DinMed S.A.S
Fabricante: Laboratorio Orgánica Biotech S.A.S
Registro Sanitario: No requiere 2017018366
Vida útil: 24 meses.
Presentación: 120 g.



Descripción:

Crema limpiadora, desincrustante y desmanchadora para uso en consultorios odontológicos, veterinarias, centros estéticos, entre otros.

Contiene abrasivos muy suaves que garantizan una profunda y completa limpieza de las superficies donde se aplica, además de solventes naturales a base de d-limoneno que eliminan óxido, manchas y grasa de forma efectiva.

Especialmente diseñado para la limpieza y desmanchado de todo tipo de instrumentos y superficies metálicos, disuelve residuos minerales y grasos causados por aguas duras, quita manchas amarillas causadas por la exposición continua al calor en máquinas esterilizadoras, elimina óxido en material viejo y desgastado, evita el uso de limpiadores ácidos que son contaminantes y producen vapores y residuos.

Indicaciones:

Limpieza y desmanchado de instrumental metálico, se puede utilizar para eliminar residuos minerales en cámaras de máquinas esterilizadoras, limpieza de mesones en acero inoxidable.

No se debe utilizar sobre superficies plásticas o pintadas, tampoco en instrumentos de acero al carbón cromado ya que este se caracteriza por ser un enchape cromado que se despega muy fácilmente.

Modo de uso:

Aplicarse una pequeña cantidad, frote con esponjilla de nailon, cepillos metálicos o de plástico, remueva el exceso con toallas de papel y enjuague con agua.

Disposición final:

Ninguno. 100% Biodegradable..

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA INSTRUMENTAL

LÍNEA MULTIPROPÓSITO

DinMed

Condiciones de transporte:

Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar (iluminación artificial preferiblemente).

Precauciones:

Utilizar los elementos de protección personal como gafas, guantes y tapabocas.

No requiere mascarillas de protección, no genera vapores.

Para más información consultar la FDS.

Nota: El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento.

No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.

