

FICHA TÉCNICA

LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL

LINEA MULTIPROPÓSITO

DinMed



Comercializador: DinMed S.A.S
Fabricante: Laboratorio Orgánica Biotech S.A.S
Registro Sanitario: No requiere 2024014069
Vida útil: 24 meses.
Presentación: 120 ml.

Descripción:

Lubricante limpiador multipropósito de instrumental, piezas de mano o cualquier pieza articulada que requiera lubricación diseñado para el uso en consultorios odontológicos, veterinarias, centros estéticos y otras instituciones que lo requieran, ideal para brillar superficies metálicas y protegerlas de la corrosión y el óxido.

Es excelente para recuperar la movilidad en piezas articuladas como tijeras, pinzas o instrumentos varios.

Composición:

Lubricante en aerosol, aceite natural, D-limoneno.

Modo de uso:

Aplicar rociando una pequeña cantidad garantizando que queden bien cubiertas las partes de la pieza a lubricar o las superficies y secar el exceso con una toalla de papel o microfibra.

Descarte:

Es un producto 100% biodegradable y puede ser dispuesto como residuo ordinario.

Condiciones de transporte:

Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar (iluminación artificial preferiblemente).

FICHA TÉCNICA

LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL

LINEA MULTIPROPÓSITO

DinMed

Precauciones:

Utilizar los elementos de protección personal como gafas y guantes.

No ingerir.

Para más información consultar la FDS.

Nota: El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento.

No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.

