

FICHA TÉCNICA

NATURAL GREEN

LINEA HOSPITALARIA



Comercializador: DinMed S.A.S

Fabricante: Laboratorio Orgánica Biotech S.A.S

Registro Sanitario: No requiere 2018018571

Vida útil: 24 meses.

Presentación: Galón X 4000 ml, cuñete x 20 L

Descripción genérica: Detergente desengrasante

Descripción:

Es un detergente desengrasante neutro a base de solventes derivados de la cascara de la naranja, remueve grasas, aceites y residuos que se adhieren a instrumentos y equipos en clínicas, hospitales, centros de estética y veterinarias.

Es un excelente coadyuvante de prelavado en endoscopios, equipos de liposucción, copas de cavitación y en general instrumentos usados en absorción de grasas corporales que son muy difíciles de eliminar con detergentes enzimáticos y jabones comunes.

Sus ingredientes naturales emulsifican toda la materia orgánica e inorgánica en instrumental y equipos sin dañarlos.

Anticorrosivo: Contiene inhibidores de corrosión, ayuda a controlar y evitar el óxido en superficies metálicas.

Desodoriza: Mientras limpia, deja un agradable olor cítrico.

Indicaciones:

Para limpieza y desengrasado de áreas, superficies, equipos e instrumentos. Usar posteriormente detergente multienzimático o desinfectante según protocolo institucional.

Limpia por emulsificación espontánea, sus agentes surfactantes reducen la resistencia de aceites y grasas con el agua, remueven la materia orgánica de las superficies y facilitan el posterior enjuague de las piezas con agua.

FICHA TÉCNICA

NATURAL GREEN

LINEA HOSPITALARIA



Modo de uso:

- **Limpieza de accesorios e instrumental:** Diluya 15 ml por litro de agua.
- **Limpieza general:** Diluya 30 ml por litro de agua.
- **Uso en termolavadoras:** Utilizar 1 ml por litro de agua.

La solución durará preparada 30 días, debe marcarse la fecha de preparación, almacenarse en un recipiente opaco y no puede exponerse a la luz solar.

Propiedades:

Propiedades	
Forma	Líquido
Olor	Cítrico suave
Color	Azul
Efectividad en agua	Excelente
Espuma	Alta
Fosfatos	Ninguno
Biodegradabilidad	Completa
Estable en almacén	24 meses
Estabilidad en frío	0°C
Factor corrosivo	Ninguno
Inflamable	No
Punto de ebullición	100°C
Presión de vapor	Ninguna
Soluble en agua	100%
Gravedad específica	1.1
Parámetro de PH	11.5 ± 0.5
USDA	C - 1

Descarte: Es 100 % ecológico y biodegradable, no necesita inactivarse y puede ser desechado directamente en drenajes y cañerías.

FICHA TÉCNICA

NATURAL GREEN

LINEA HOSPITALARIA



DinMed

Precauciones:

Utilizar los elementos de protección personal como gafas, guantes y tapabocas.

No tóxico – No genera vapores.

No contiene solventes derivados del petróleo.

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar (iluminación artificial preferiblemente).

Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

Nota: El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento.

No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.

