



FORMATO	CÓDIGO: PCC01
	VERSIÓN: 02
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO	PÁGINAS 1 DE 1

Notificación sanitaria N° 2024014073

OB CAVEX

Remueve residuos de alginatos, yesos y cementos endurecidos, disolviendo la tensión superficial.

Elimina la necesidad de tener que raspar y restregar los instrumentos, evitando que se rayen o rompan alargando su vida útil, la remoción de alginatos y yeso son labores que demandan tiempo en el consultorio y con **OB CAVEX** se simplifica la operación. Este producto es muy útil para ser utilizado en implantes ortopedicos, reemplazos totales de articulaciones donde se requiera remover el yeso.

En la parte médico hospitalaria con material de osteosíntesis, y en la dental es ideal para remover elementos adheridos a herramientas dentales, espátulas y cubetas de impresión. Producto de rápida acción y biodegradable.

El uso continuo de este producto evitará que los instrumentos se rayen al quedar microrasguños en estos, donde se depositan residuos que posteriormente no dejan esterilizar bien los elementos, adicional al disminuir la tensión de los residuos el proceso de limpieza será mucho más rápido.

MODO DE USO:

Llene un recipiente o cubeta con 1 a 2 litros de agua tibia y agregue por litro dos cucharadas de **OB CAVEX**. Deje actuar por espacio de 15 a 30 minutos, retire los instrumentos, refriéguelos con esponja de nylon o cepillo y enjuague con agua potable. Esta solución dura preparada hasta por espacio de 8 días. Posteriormente arroje el desecho por sifones y drenajes retirando previamente los desechos de cementos y alginatos.



OB CAVEX

PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL



PRESENTACIÓN COMERCIAL



ENVASE POTE X 800 GRAMOS

PRECAUCIONES GENERALES

UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL; MONOGAFAS Y GUANTES



CUALQUIER INQUIETUD O REQUERIMIENTO ADICIONAL, COMUNÍQUESE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LABORATORIO ORGÁNICA BIOTECH
organicacomercial@gmail.com - www.organicalab.com.co - Whatsapp de contacto: 322 930 5707 - Medellín, Colombia.

E-MAIL: INFO@ORGANICABIOTECH.COM.CO - WWW.ORGANICALAB.COM.CO
Laboratorio Organica Biotech s.a.s - Cra 51B calle 1 sur-28. Medellín, Colombia