

FICHA TÉCNICA

CITRILUB EMULSIÓN

LINEA HOSPITALARIA

DinMed



Comercializador: DinMed S.A.S

Fabricante: Laboratorio Orgánica Biotech S.A.S

Registro Sanitario: No requiere 2017018365.

Fecha de vencimiento del registro sanitario: N/A

Clasificación de riesgo: N/A

Vida útil: 24 meses.

Presentación: Galón X 4000 ml, Cuñete X 10 L.

Descripción genérica: Lubricante para instrumental quirúrgico y dispositivos médicos.

Descripción:

Lubricante diseñado para instituciones hospitalarias, indicado para el mantenimiento y preservación del instrumental quirúrgico y dispositivos médicos, puede ser usado manualmente, en termodesinfectadoras y lavadoras ultrasónicas, es compatible con acero, titanio, cromo vanadio, aluminio y plástico.

Producto natural no siliconado para no interferir en procesos térmicos de esterilización.

Componentes:

Es un producto a base de aceites naturales derivados de palma, D-limoneno solvente natural y antioxidantes.

Compatibilidad:

Es compatible con todos los dispositivos médicos e instrumental quirúrgico.

Indicaciones:

Lubricación de instrumental quirúrgico y dispositivos médicos, útil en el proceso del mantenimiento preventivo y correctivo.

Descarte: Es 100 % ecológico y biodegradable, la solución puede ser desechada directamente en drenajes y cañerías.

Precauciones:

Utilizar los elementos de protección personal como gafas, guantes y tapabocas. Producto de uso institucional e industrial.

FICHA TÉCNICA

CITRILUB EMULSIÓN

LINEA HOSPITALARIA



Modo de uso:

Antes de usar, los elementos a lubricar deben estar previamente lavados y secos.

- **Lubricación manual:** Utilice 32 mililitros por litro de agua, tiempo mínimo de inmersión 5 a 10 minutos.
- **Lubricación mecánica en termodesinfectoras y ultrasonido:** Utilice de 4 a 6 mililitros por litro, según programación de la máquina.

Después de su preparación el producto dura como tiempo máximo 8 días.

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar (iluminación artificial preferiblemente).

Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

Nota: El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento.

No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.

