

FICHA TÉCNICA

INSTRUGLO CREMA

LINEA HOSPITALARIA

DinMed



Comercializador: DinMed S.A.S

Fabricante: Laboratorio Orgánica Biotech S.A.S

Registro Sanitario: No requiere 2017018366

Fecha de vencimiento del registro sanitario: N/A

Clasificación de riesgo: N/A

Vida útil: 24 meses.

Presentación: Frasco X 300 gr

Descripción genérica: Crema desincrustante para instrumental quirúrgico y autoclaves

Descripción:

Es un limpiador y desmanchador en crema para instrumental quirúrgico, autoclaves y objetos de superficie metálica, contiene abrasivos muy suaves que garantizan una profunda y completa limpieza de las superficies donde se aplica, además de solventes naturales a base de d-limoneno.

Elimina oxido, picado de los metales, disuelve residuos minerales causados por aguas duras, remueve todo tipo de manchas incluyendo las amarillas en el instrumental debido a la exposición continua al calor en máquinas esterilizadoras y grasa de forma efectiva, evita el uso de limpiadores ácidos que son contaminantes y producen vapores y residuos peligrosos y nocivos para la salud.

Indicaciones:

Limpieza y desmanchado de instrumental quirúrgico, instrumentos de acero inoxidable, tungsteno, titanio, carburo de tungsteno y aluminio.

Limpieza de cámaras interiores de autoclave, bandejas metálicas de máquinas de ultrasonido, superficies de aluminio, cobre, bronce, plata, mesones y superficies en acero inoxidable.

No se debe utilizar sobre superficies plásticas o pintadas, tampoco en instrumentos de acero al carbón cromado ya que este se caracteriza por ser un enchape cromado que se despega muy fácilmente.

Modo de uso:

Aplicarse una pequeña cantidad directamente sobre la superficie del objeto, deje actuar de 2 a 3 minutos, frote con esponjilla de nylon, cepillos metálicos y/o de plástico, remueva el exceso con paño o toallas de papel y enjuague.

Descarte: Es 100 % ecológico y biodegradable, no necesita inactivarse y puede ser desechado directamente en drenajes y cañerías.

FICHA TÉCNICA

INSTRUGLO CREMA

LINEA HOSPITALARIA



Ingredientes activos: D-citrico, D-limoneno, piedra pomez, crema suave, detergente.

Características físico-químicas::

- **Color:** Blanco marfil.
- **Fragancia:** Limón.
- **Biodegradabilidad:** 100% biodegradable.
- No es ácido.
- No es corrosivo.

PH: $9,0 \pm 11,0$

Precauciones:

Utilizar los elementos de protección personal como gafas y guantes.

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar (iluminación artificial preferiblemente).

Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

Nota: El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento.

No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.

